

Einsatzgebiet:	Schutz vor Hautläsionen bei empfindlicher Haut (z. B. bei atrophischer Haut, Cortison- oder Pergamenthaut) Druckentlastung und Dekubitusprophylaxe Polsterung von versorgten Wunden und Fixierung von Wundauflagen
Medizinprodukt:	nach MDR (EU) 2017/745
Werkstoffklasse:	Polymer-Gel (synthetischer Kautschuk)
Innovation:	Verarbeitung in Netzstruktur
Zusatzfunktion:	Hautpflege durch eingearbeitetes pharmazeutisches Öl (USP-Qualität) Mikrostimulation der Haut durch strukturierte Oberfläche
Allergierisiko:	allergenfrei, silikonfrei, latexfrei
Weichmacher:	keine
Dermatologische Prüfung:	hautverträglich gemäß ISO 10993-10, ISO 10993-1, OECD TG 439 frei von zytotoxischen Wirkungen gemäß ISO 10993-5, ISO 10993-1, ISO 10993-12
Dicke des Gels:	Größe S: 4 mm, Größe M: 5 mm
Weichheitsgrad:	62 Shore 000
Inhalt pro Verkaufsverpackung:	1 Paar Polsterverbände (2 Stück) Finger-Polsterringe sind erhältlich in 12er- und 100er-Packungen 1 x Puder zur Produktpflege

Maße und Größenangaben:

! Für alle Maßangaben gilt ein Toleranzbereich von 1–2 cm.
Bitte achten Sie darauf, dass das Polster locker aber sicher auf der Haut sitzt.

Arm-Polsterverband	Größe XS	Größe S	Größe M	
Umfang unterhalb des Ellenbogens	21 – 24 cm	25 – 29 cm	30 – 33 cm	
Umfang oberhalb des Handgelenks	12 – 15 cm	16 – 22 cm	23 – 26 cm	
PZN	13870866	13358401	13358393	
Ellenbogen-Polsterverband	Größe XS	Größe S	Größe M	
Umfang mittlerer Oberarm	21 – 24 cm	25 – 29 cm	30 – 33 cm	
Umfang mittlerer Unterarm	12 – 15 cm	16 – 22 cm	23 – 26 cm	
PZN	13870872	13358424	13358418	
Fersen-Polsterverband	Größe S		Größe M	
Umfang am Spann	14 – 18 cm		19 – 24 cm	
Umfang oberhalb der Knöchel	15 – 19 cm		19 – 23 cm	
PZN	13358447		13358430	
Schienbein-Polsterverband	Größe XS	Größe S	Größe M	
Umfang unterhalb des Knies	21 – 24 cm	25 – 29 cm	30 – 33 cm	
Umfang oberhalb der Knöchel	12 – 15 cm	16 – 22 cm	23 – 26 cm	
PZN	13870889	13358476	13358453	
Finger-Polsterringe	Größe XS	Größe S	Größe M	Größe L
Innenumfang	4,5 - 5 cm	5 - 5,7 cm	5,7 - 6,5 cm	6,5 - 7,5 cm
Durchmesser	1 cm	1,3 cm	1,7 cm	2,1 cm
Länge	1,8 cm	2,5 cm	3 cm	3,6 cm
PZN 100 Stück	13896104	13896156	13896127	13896073
PZN 12 Stück	13896044	13896073		

Verwendbarkeit:	Mehrfach verwendbar, kein Einwegartikel. Der Patient/die Patientin kann das Armpolster nach dem Waschen erneut tragen. Bei Bedarf kann es auch desinfiziert und sterilisiert werden.
Reinigung:	Handwäsche mit milder Seife und Wasser Maschinenwäsche im Wäschebeutel bis 60 °C
Desinfektion:	mit Hautdesinfektionsmittel
Sterilisierung:	mit Ethylenoxid
Produktpflege:	Nach dem Waschen und Trocknen sowie bei Bedarf mit dem mitgelieferten Puder (alternativ Babypuder bzw. Talkum) auffrischen, damit das Produkt besser über die Haut gleitet und die samtene Produktoberfläche erhalten bleibt.
Dauer der täglichen Anwendung:	maximal 20 Stunden pro Tag, für mindestens 4 Stunden am Tag abnehmen
Kontraindikationen:	Keine direkte Anwendung auf offenen Wunden – nur in Verbindung mit Wundauflagen. Vermeiden Sie größere Puderrückstände auf offenen Wunden, da Puder Feuchtigkeit bindet.
Lagerung:	Trocken bei Raumtemperatur und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	5 Jahre ab Produktion haltbar, siehe Verfallsdatum auf dem Etikett
Entsorgung:	im Hausmüll
Lebensdauer:	Die Lebensdauer ist abhängig von der Produktvariante, der korrekten Handhabung und Produktpflege sowie dem Belastungsgrad in der Anwendung. Armpolster haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 – 8 Monaten, Fersenpolster durch punktuelle Auflage und Reibung bei Bettlägerigkeit entsprechend weniger (1 – 4 Monate). Bitte ersetzen Sie das Produkt, wenn das Material beginnt, durch Dehnung und Abrieb porös zu werden oder seine Elastizität und Polsterwirkung verliert.

Hinweise zum Anlegen:



Code mit der Handy-App abschnappen und unser Video für die korrekte Handhabung ansehen.

Rollen Sie den Verband beginnend am oberen, also am breiten Ende des Polsterverbands auf und legen ihn an die Gliedmaße an, ähnlich wie beim Anziehen eines Strumpfes. Rollen Sie ihn in einer langsamen Aufwärtsbewegung über die Haut. Stellen Sie dabei sicher, dass die aufgefüllte Gitterstruktur bei Fersen- und Armpolster über der Ferse bzw. dem Ellenbogen liegt. Das obere Ende fixiert das Polster auf der Gliedmaße und sollte deshalb fest genug sitzen, ohne dabei die Blutzirkulation oder das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Der Rest des Polsters sollte so locker aufliegen, dass bis zu zwei Fingerbreit Platz zwischen Material und Haut verbleiben. Die Praxis zeigt, dass mobile AnwenderInnen ein engeres Anliegen auf der Haut präferieren, damit der Verband bei Aktivitäten durch weniger Bewegungsspielraum nicht als störend empfunden wird. Auch in diesem Fall tragen Sie bitte dafür Sorge, dass das Polster nicht das Gewebe abschnürt oder das Material beim Anlegen so stark gedehnt wird, dass es reißt.

- ⚠ **Bitte beachten Sie, dass bei einem korrekten Anlegen des Polsterverbands keine Kraft aufgewendet werden muss.**
- ⚠ **Tragen Sie das Polster nicht unter hochwertiger Kleidung.**

<p>Exklusiver Vertrieb: ROGG Verbandstoffe GmbH & Co. KG Oberndorfer Str. 7 85777 Fahrenzhausen Telefon: +49 8133 9320-0 Telefax: +49 8133 9320-25 E-Mail: info@rogg-verbandstoffe.de</p> <p>Mehr Informationen unter: www.yathan.de</p>	<p>Hersteller: Suavepie SAIC Ramón L. Falcón 2232 1406 Buenos Aires, Argentinien www.suavepie.com</p>	<p>EC Rep MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstraße 80 66386 St. Ingbert - Deutschland</p>
---	--	---